


ANWENDUNGSHINWEISE (PRODUKT-PFLEGE)

Stuhldrainage – hyghtec® basic-plus

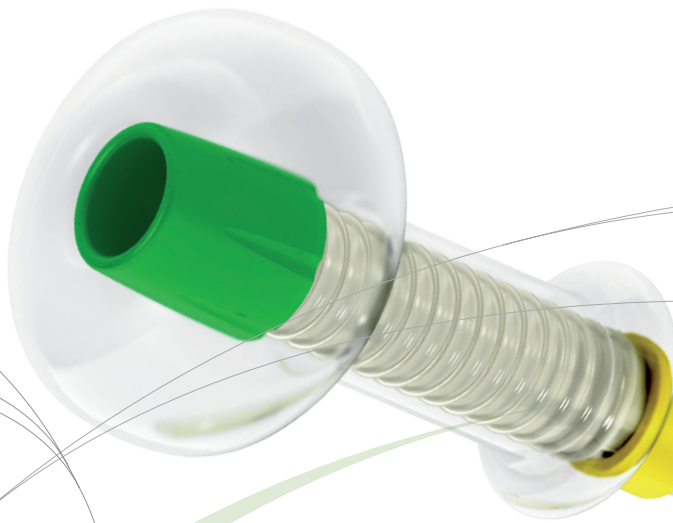

Produkt-Pflegeanweisung – hyghtec® basic-plus

Rektale Irrigation zur Reinigung der Rektum-Ampulle von breiigen/festen Stuhlanteilen

- **1 x täglich 500 ml körperwarme Infusionslösung**
(z. B. 0,9% NaCl oder Ringer-Lösung)


- › in Linksseitenlage des Patienten
- › Einlauf über Infusionsbesteck
- › durch den Einlauf/Spül-Port



Spülung des Systems zur Reinigung des Systems

- **3 x täglich 150 ml körperwarmes Wasser**

- › jeweils drei Spritzenfüllungen á 50 ml
- › durch den Einlauf/Spül-Port

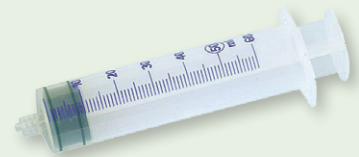

Kontinuierliche Stuhlverflüssigung durch oral verabreichte Quellmittel

hyghtec® basic-plus ermöglicht konsequente Stuhlverflüssigung, und optimiert so seine Funktion. Sämtliche Maßnahmen zur Stuhlmodifikation sind vom behandelnden Arzt zu verordnen.

- **Polyethylenglycol**
(z. B. Macrogol® Btl. 1-0-1)

Das Macrogol-Pulver bleibt bis zum Entfernen des Systems im Medikamentenplan.

- **Natriumpicosulfat**
(z. B. Laxoberal® Tropfen 12-0-0)

Das Laxoberal wird als erste Substanz abgesetzt (meist nach 3 – 5 Tagen), sobald sich dünnbreiiger und flüssiger Stuhlgang durch die Spülung gewinnen lässt. Bei starker Wirkung/abdominellen Missempfindungen auf 8 Tropfen reduzieren.

- **Sab-Simplex®**
(10-0-10 ml)

Die Gabe von Sab-Simplex reduziert die abdominellen Missempfindungen und lässt Luft leichter „abgehen“.

Weitere Medikation zur Stuhlmodifikation sollte nicht erforderlich sein. | Führen Sie ergänzend zur oralen Medikation 1x/Tag eine rektale Irrigation mit 250 bis 500 ml körperwarmer, kristalloider Spüllösung durch. Vollkost kann grundsätzlich beibehalten werden, grobfaserige Nahrungsmittel sollten vermieden werden.

Bei Fragen zur Anwendung: +49(0)7254.40397-10

Advanced Medical Ballons GmbH | Bruchsaler Straße 22 | 68753 Waghäusel | info@hyghtec.de | www.hyghtec.de