

# AnapnoGuard™

Innovative Airway Management Solution

## Der AnapnoGuard CUFFILL Cuffdruck messen leicht gemacht

Der AnapnoGuard CUFFILL (AG CUFFILL) ermöglicht eine einfache, präzise und sofort verfügbare Druckregulierung des Cuff unter allen Bedingungen.

Dieses einfach zu bedienende, kompakte und intuitive Hilfsmittel ist der kleinste verfügbare Cuffdruckmesser, der für die Verwendung mit Endotracheal und Tracheotomie Tuben sowie für Larynxmasken geeignet ist.

Der AG CUFFILL ist als kosteneffizientes Produkt gestaltet und für die klinische sowie präklinische Verwendung geeignet.

Es wird der Einpatientengebrauch des AG CUFFILL empfohlen, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu verringern.



# AnapnoGuard™

Innovative Airway Management Solution

## AG CUFFILL Vorteile

- 100 Anwendungen
- 10 ml Hubvolumen
- Messbereich 0 - 99 cmH<sub>2</sub>O
- Messgenauigkeit ± 2 cmH<sub>2</sub>O
- Automatisches Abschalten
- Ideal für den Einmalgebrauch
- FDA und CE zertifiziert

Maßeinheit	Artikelnummer	Modell
cmH <sub>2</sub> O	321000801	HSCUFF041

## Bedienungsanleitung

- Schalten Sie den AG CUFFILL durch Drücken der gelben Taste an (bleibt für 60 Sekunden angeschaltet).

## Cuffdruck messen

- Befolgen Sie die Anweisungen im rechten Bild:

## Cuff befüllen/entlüften

- Ziehen Sie den AG Cuffill auf ca. 3 ml auf (oder nach Bedarf). Konnectieren Sie dann den AG Cuffill mit dem Cuffüllventil.
- Befüllen/Entlüften Sie den Cuff, durch Verschieben des Spritzenkolbens, bis der gewünschte Cuffdruck erreicht ist.

Der Cuffill ist fest an dem Cuffüllventil befestigt

Während der gesamten Messung ist der Spritzenkolben an das distale Ende der Spritze geschoben



- Der Cuffdruck verändert sich mit den Atemzyklen
- Der angezeigte Cuffdruck ist der Niedrigste der aufgezeichnet wurde

## Über Hospitech Respiration Ltd.

Die Hospitech Ltd. befasst sich mit der Entwicklung und Vermarktung von innovativen Lösungen für das Atemwegsmanagement, um bei maschinell beatmeten und intubierten Patienten den Patientenkomfort zu erhöhen, die Patientensicherheit zu fördern und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.



Hospitech Respiration

Israel, Tel: +972-3-9191648, Fax: +972-3-9191647  
info@hospitech.co.il, [www.hospitech.co.il](http://www.hospitech.co.il)

Copyright© 2013 Hospitech Respiration Ltd.

distributed and imported by:



*medical systems*  
*solution*

Industriestrasse 26, CH-5036 Oberentfelden  
Tel: +41 (0) 848 848 948 ; Fax: +41 (0) 848 848 949  
info@medicalsol.ch ; [www.medicalsol.ch](http://www.medicalsol.ch)

Patent angemeldet